

Tantum Rosa Irigator Prospect

Irigator pentru igienă intimă
500 ml

Irigatorul Tantum Rosa a fost conceput pentru spălături vaginale. Este sigur, realizat din material plastic moale și flexibil. Irigatorul poate fi refolosit.

Etapele irigării:

1. Preparare

- Utilizați apă fiartă și răcită la temperatura corpului pentru prepararea soluției de irigare.
- Umpleți recipientul cu 500 ml (1/2 l) soluție de spălare.
- Înșurubați canula irigatorului pe recipient.

2. Utilizare

- Pe cât posibil irigarea ar trebui făcută în poziție șezând, ideal într-o cadă fără apă (A) – sau în picioare deasupra unei cădițe de duș (B). În oricare din cazuri, irigarea trebuie efectuată într-o poziție sigură și stabilă (ex: utilizați un covoraș pentru a evita alunecarea). Irigarea poate fi de asemenea realizată în poziție șezând pe bideu sau toaletă (C).
- Introduceți încet canula irigatorului în vagin cât mai adânc posibil.

3. Irigare

- Recipientul trebuie ținut cu amândouă mâinile, degetele mari trebuie poziționate în partea superioară a corpului irigatorului, în apropierea canulei. Comprimați burduful irigatorului pentru a elibera soluția.

4. După irigare

- Scoateți cu grijă canula din vagin, ținând recipientul strâns apăsător, pentru a nu aspira fluidele vaginale în irigator.

5. Curățare

- Deșurubați canula de pe recipient.
- Spălați amândouă părțile cu apă caldă (până la 40° C) și lăsați-le la uscat.

Atenționări

- Părțile componente ale irigatorului nu se spală la mașină.
- Nu sterilizați.
- Nu încălziți peste 40° C.
- Nu utilizați soluții dezinfectante și corozive.
- Nu utilizați soluții iritante sau tensioactive (detergenți).
- Irigatorul este strict pentru uz individual.
- Atenție: Femeile care nu au început viața sexuală nu trebuie să utilizeze irigatorul,

deoarece se poate afecta integritatea himenului.

Irigarea vaginală trebuie făcută conform recomandărilor medicului.

În cazul unor întrebări privind utilizarea irigatorului, vă rugăm contactați medicul dumneavoastră.



Citiți instrucțiunile de utilizare


LOT

Număr lot


Producător

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Pátevní 7, 635 00 Brno, Republica Cehă

Ultima revizuire a instrucțiunilor de utilizare: 06/2019

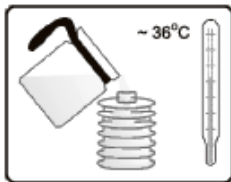

1

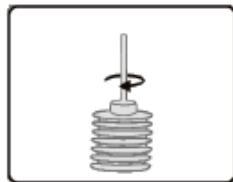


2



3



4

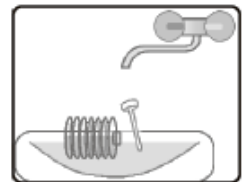

5



A



B



C

CE